

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ПРИСТАВКИ К СМАРТФОНУ ИКР3-1 «СЕРДЕЧКО»

Подмышечные электроды предназначены для получения ЭКГ более высокого качества. Они представляют собой плоские пластины, покрытые серебром.

Подмышечные электроды не входят в основной комплект и поставляются отдельно как дополнительная опция!

Порядок использования подмышечных электродов

1. Извлеките электроды из полиэтиленового пакета (рис. 1).



Рис. 1

2. Размотайте электродный кабель, вставьте вилки кабеля в разъемы на корпусе прибора в соответствии с цветовым кодом (рис. 2).

Рис. 2



3. Расположите электроды в подмышечных впадинах (рис.3). Поместите их как можно выше, как это делается при использовании обычного ртутного термометра. Электрод **с черной маркировкой** должен быть **слева**, а с **красной – справа**. *Обратите особое внимание на аккуратность выполнения этой операции!*

4. Проведите запись ЭКГ, как это указано в основной инструкции.

5. После окончания записи электродный кабель нужно аккуратно смотать на кисти руки и поместить обратно в специальный пакет (см. рис. 1).

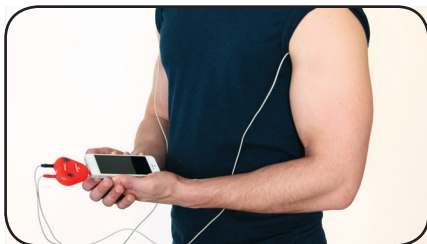


Рис. 3